



Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=e8XcAA-k19k&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De8XcAA-k19k&has_verified=1

Etapy zastosowanie kateteru do diagnozującego badania HSG/SHSG

1. Należy wprowadzić wziernik dopochwowy i rozszerzyć szyjkę macicy na odpowiednią szerokość
2. Wprowadzić cewnik kateteru do wnętrza pochwy, na odpowiednią głębokość
3. Strzykawką nadmuchać balonik, po czym „zakotwiczyć” ów balonik na pograniczu trzonu i cięśni macicy
4. Zakręcić zaworek przy strzykawce tak, aby powietrze z balonika nie uleciało
5. Podłączyć do drugiego kanału potrzebną aparaturę ze środkiem cieniującym (użyć odpowiedniego środka w zależności od rodzaju badania: HSG lub SHSG)
6. Wprowadzić odpowiednio środek cieniujący za pomocą kateteru.